


Bäddkort för 4-way

Brukare: _____

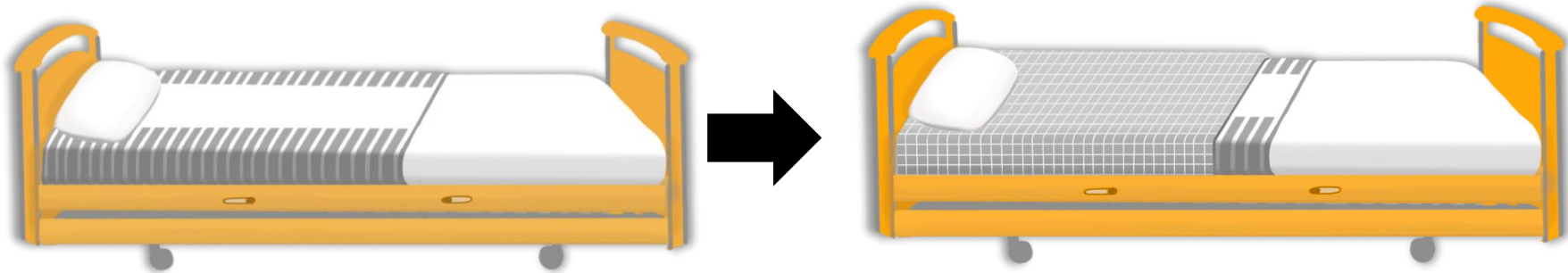

1. Glidlakan bäddas runt madrassen (ej för spänt på tryckavlastande madrass).
Lakanet ska vara vänt så att etiketten syns och är i huvudändan.

2. Fyrvägs gliddraglakan bäddas med glidytan nedåt mot glidlakanet. Det ska vara vänt så att etiketten syns och är i huvudändan.

- **För att minska risken för att brukaren ska glida ur sängen:**
När du lämnar brukaren ska gliddraglakanet vara inbäddat med kanterna runt madrassen och grindarna uppdragna (OBS! Samtycke krävs för grindarna).
- **Vid behov av inkontinensskydd:** Inkontinensskyddet bäddas **ovanpå** 4-vägs gliddraglakanet.
- **Detta är ett förskrivet hjälpmedel**, returneras till HMS när behovet upphör.