


Bäddkort för TurnAid




Falkenbergs
kommun

Kund: _____

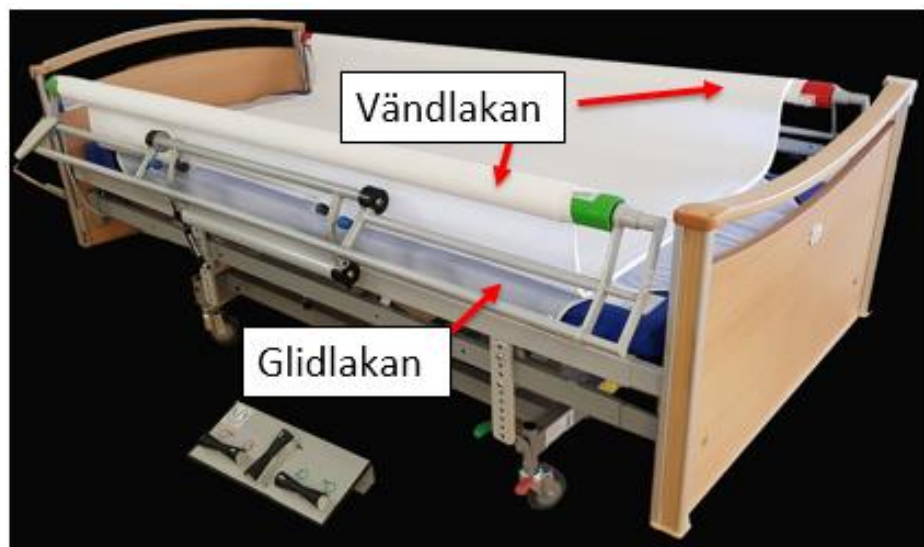

Sängen får endast bäddas med TurnAid vändlakan och TurnAid glidlakan. Glidlakanet spänns runt madrassen, med glidytan uppåt. Glidlakanets kardborreband fästs runt sängens rörliga delar. Vändlakanet fästs och rullas upp på valsarna. OBS! Viktigt att de rullas på från ovansidan, se bild nedan.

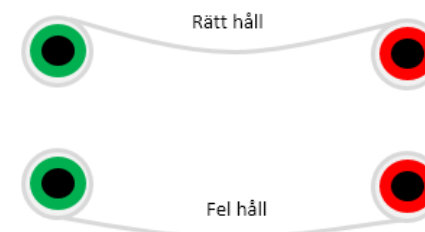

- OBS! Om brukaren ska lämnas med grinden uppe så ska grinden vara vänd med valsen **nedåt**
- Alla glid- och vändlakan tvättas **utan sköljmedel** upp till 90 grader, torktumlas på svag värme

Inkontinensskydd
får användas ovanpå
bäddningen

JA NEJ

Grindskydd
(Grå TurnAid) ska
användas

JA NEJ

Övrigt: _____