

Bäddkort

WendyLett4way med handtag



Falkenbergs
kommun

Kund: _____

WendyLett glidlakan (underlakan)

140cm*200cm. Bäddas ovanpå brukarens vanliga lakan. Bäddas från huvudgavel ner till knähöjd. Spärtyget ska ligga centrerat för att undvika urglidning. Glidytan ska vara vänd uppåt.



WendyLett4way med handtag

placeras ovanpå glidunderlakanet, med glidytan **nedåt** mot **glidunderlakanet**.



Inkontinensskydd får användas ovanpå bäddningen:

- Ja
 Nej

- **Viktigt!** Efter genomförd vändning/positionering fästes **WendyLett4way med handtag** under madrassen för att bromsa glidrörelser!
- Vik en **stoppkant** på **WendyLett4ways** nedre del under låren och fäst det innan ni höjer sängens ben- resp. huvuddel, för att undvika nedglidning av brukaren.
- OBS! Alla glidlakan tvättas **utan sköljmedel** upp till 90 grader, torktumlas på svag värme!

Övrigt: _____

Bäddkort

WendyLett4way med handtag

WendyLett helt glidlakan (underlakan) med resår. Spärtyget ska ligga centrerat för att undvika urglidning. Glidytan ska vara vänd uppåt med etiketten i huvudändan.



WendyLett helt glidlakan (underlakan) med resår. Spärtyget ska ligga centrerat för att undvika urglidning. Glidytan ska vara vänd uppåt med etiketten i huvudändan.

