

## Utprovningsprotokoll vid förflyttning med lyftsele – Basic comfort high

Lyftselen utprovad till..... Födelsedata.....


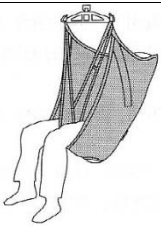





Lyftselen förskriven av..... Telefon.....

Delgiven..... Datum.....

Lyftsele (fabrikat, modell och storlek).....

Används ihop med följande lyft (fabrikat, modell).....

Lyftselen används vid alla förflyttningar  Ja  Nej, enbart vid följande tillfällen

<p><b>Ryggdelens placering:</b></p>  <p><b>Nederkant</b>  <input type="checkbox"/> Svanskotan</p>	 <p><input type="checkbox"/> Överkanten på selen ska ge stöd för huvudet</p>	<p><b>Fäst lyftselens öglor i lyftbygeln enligt följande:</b></p> <p>Huvud / ryggdel : .....</p> <p>Bindel:.....</p>
<p><b>Armarnas placering</b></p>  		<p><b>Tillbehör</b></p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p><b>Röda korsade remmar</b></p>  <p><input type="checkbox"/></p> <p>Gör en ögla av bandelarnas röda band. De inre korta grå lyftbanden ska sedan träs genom den röda ögla.</p>	<p><b>Instruktioner vid applicering/förflyttning</b></p> <p><input type="checkbox"/> Ska utföras av 2 personer.</p> <p><input type="checkbox"/> Får utföras av 1 person.</p> <p><input type="checkbox"/> Lyftselen ska tas bort efter förflyttning.</p> <p><input type="checkbox"/> Brukaren kan sitta kvar på lyftselen i rullstol efter förflyttning.</p> <p><input type="checkbox"/> Övrigt:.....</p>	
<p><b>Gråa korsade remmar</b></p>  <p><input type="checkbox"/></p> <p>De inre korta grå banden korsas genom varandra. De yttre långa grå banden träs genom de korta inre grå banden. "Lång genom kort ögla".</p>	<p><b>Ben delar under stuss</b></p>  <p><input type="checkbox"/></p> <p>Applicera bandelarna omlott. Trä de yttre långa grå banden genom de korta inre grå banden. "Lång genom kort ögla".</p>	<p><b>Observera</b></p> <p>– Kontrollera lyftselens band, sömmar, upphängningsöglor och tyg inför varje lyft och efter tvätt.</p> <p>– Kontakta arbetsterapeut/fysioterapeut om brukarens vikt, funktionsnivå eller behov förändras.</p>