



Utprovningsprotokoll vid förflyttning med lyftsle – Basic comfort high

Lyftselen utprovad till.....Födelsedata.....

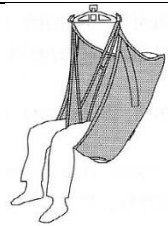
Lyftselen förskriven av..... Telefon.....

Delgiven..... Datum.....

Lyftsle (fabrikat, modell, serienr. och storlek).....

Används ihop med följande lyft (fabrikat, modell).....

Lyftselen används vid alla förflyttningar ☐ Ja ☐ Nej, enbart vid följande tillfällen

Ryggdelens placering:  Nederkant ☐ Svanskotan	 ☐ Överkanten på selen ska ge stöd för huvudet	Fäst lyftselsens öglor i lyftbygeln enligt följande: Huvud / ryggdel : Bindel:.....
Armarnas placering  	Tillbehör 	
Röda korsade remmar  ☐ Gör en ögla av bandelarnas röda band. De inre korta grå lyftbanden ska sedan träs genom den röda ögla.	Instruktioner vid applicering/förflyttning ☐ Ska utföras av 2 personer. ☐ Får utföras av 1 person. ☐ Lyftselen ska tas bort efter förflyttning. ☐ Brukaren kan sitta kvar på lyftselen i rullstol efter förflyttning. ☐ Övrigt:.....	
Gråa korsade remmar  ☐ De inre korta grå banden korsas genom varandra. De yttre långa grå banden träs genom de korta inre grå banden. "Lång genom kort ögla".	Ben delar under stuss  ☐ Applicera bandelarna omlott. Trä de yttre långa grå banden genom de korta inre grå banden. "Lång genom kort ögla".	Observera – Kontrollera lyftselsens band, sömmar, upphängningsöglor och tyg inför varje lyft och efter tvätt. – Kontakta arbetsterapeut/fysioterapeut om brukarens vikt, funktionsnivå eller behov förändras.